

- 本製品は一般家庭用です。
- 組み立てにプラスドライバーをご用意ください。
- 床や部材に傷がつかないよう敷物などをして組み立ててください。

# シャワーチェア

## 取扱い・組み立て説明書

KCB-54

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示

- 外形寸法(約) 幅 47.5 (最小 47.5~最大 51)×奥行 49(最小 49~最大 51)×高さ 68.5 (最小 68.5~最大 83.5)(cm)  
座面の高さ / 36.5 (最小 36.5~最大 51.5)(cm)
- 構造部材 フレーム / 金属(アルミニウム)  
座部 / ポリエチレン  
パッド / EVA樹脂  
脚ゴム / 天然ゴム
- 表面加工 フレーム / ポリエステル塗装
- 最大使用者体重 100kg(保証値ではありません)

MADE IN CHINA

## 安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

### ！ 警告

- ・座面の上に立つ・脚をかける・飛び乗る等しないでください。
- ・上体を後方に大きくのけぞらせる等背もたれに体重をかけすぎないでください。

- ・浴室の洗い場以外で使用しないでください。
- ・踏み台や脚立として使用しないでください。
- ・子どもの遊び道具として使用しないでください。
- ・座面の端や背もたれに座らないでください。
- ・体重が100kg以上の方は使用できません。
- ・人が座っている状態で椅子を移動させないでください。
- ・二人以上同時に座らないでください。
- ・脚部の調整ピンが確実に固定されていることを確認してください。
- ・分解や修理・改造はしないでください。
- ・浴室内の平らで安定した場所でご使用ください。
- ・脚の高さは必ず同じ高さに調整してください。



### ！ 注意

- ・背もたれを支えにして立ち上がったたり移動したりしないでください。
- ・水中に沈めての使用や清掃はできません。
- ・タワシや研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しないでください。
- ・塩素系薬剤を使った殺菌・消毒をしないでください。
- ・温泉水や硫黄系の入浴剤を使用しないでください。
- ・屋外や直射日光が当たる場所での使用・保管はしないでください。
- ・サウナや火気に近い場所での使用しないでください。
- ・お手入れはうすめた中性洗剤とやわらかい布でおこなってください。
- ・ご使用後は洗剤が残らないよう水洗いし乾いた布で水分を拭きとってください。
- ・50度以上の熱湯をかけないでください。劣化や破損の原因になります。
- ・脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認してください。
- ・定期的に変形や破損、ネジの緩みがないか点検してください。
- ・異常が見つかった場合直ちに使用を中止してください。



## 部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。


(A)座部(パッド付)  1	(B)脚部パイプ 上  1	(C)脚部パイプ 下  1
(D)シャワーフック  1	(E)背部(パッド付)  1	(F)背部パイプ  2
(1)座部用プラスボルト 湾曲ワッシャー付  1	(2)プラスボルト 短 湾曲ワッシャー付  4	(3)プラスボルト 長 湾曲ワッシャー付  4

## 組 み 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

### 1 背部に背部パイプを取り付けます。

※ボルトは **仮締め** してください。

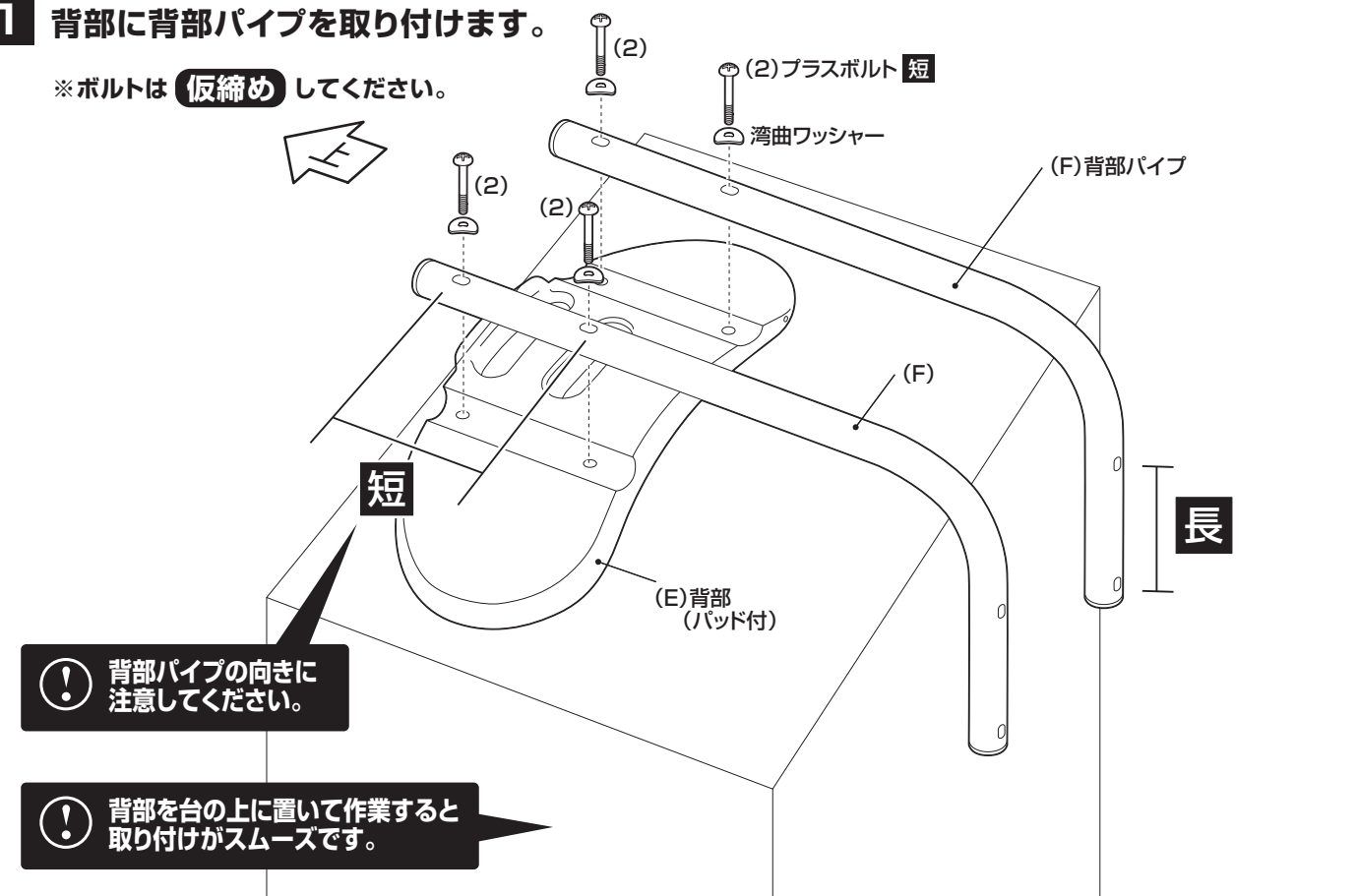

！ 背部パイプの向きに注意してください。

！ 背部を台の上に置いて作業すると取り付けがスムーズです。

# 組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

**2 座部に脚部パイプを取り付けます。**

※ボルトは **仮締め** してください。

(C)脚部パイプ 下

(B)脚部パイプ 上

下側に凹みがある方を先に取り付けます。

(1)座部用プラスボルト  
湾曲ワッシャー

(C)脚部パイプ 下

(B)脚部パイプ 上

(A)座部 (パッド付)

刻印がある方が後側です。

前

**4 シャワーフックを取り付けます。**

※平らな床に置いた状態でボルトを **全て本締め** してください。

(D)シャワーフック

シャワーフックの輪っかは厚みが違います。「薄い方」をチェアの脚部パイプに取り付けてください。

薄い 厚い

使い勝手の良い箇所に付けてください。

**3 2で組み立てた座部に、1で組み立てた背部を取り付けます。**

※ボルトは **仮締め** してください。

(3)プラスボルト 長

湾曲ワッシャー

(3)

(3)

(3)

2で組み立てた座部


1で組み立てた背部

前


**5 最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。**

使用 方 法

シャワーヘッドをフックに掛けることができます。

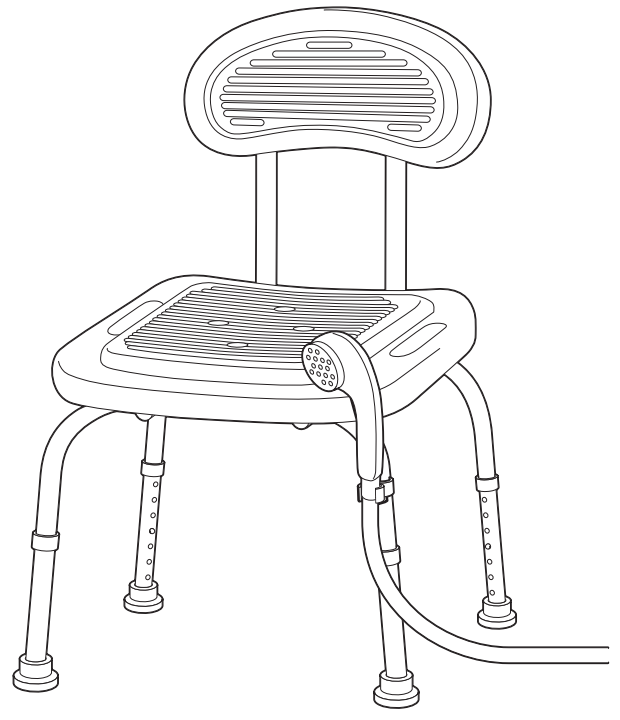

座面の高さ調整ができます。

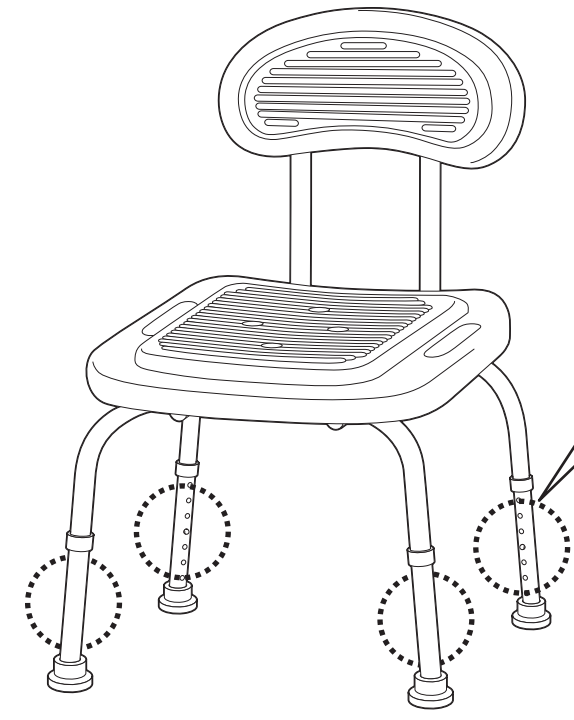

調整ボタンを  
押しながら  
上下に高さ調節  
ができます。

調整ピン

- 1.調整ピンを押しロックを外してください。
- 2.脚パイプをスライドさせ、使いやすい高さの  
パイプ穴に調整ピンを合わせてください。  
調整ピンが飛び出し高さが固定されます。
- 3.脚パイプが固定されていることを確認して  
ください。


❗ 脚は全て同じ高さに調整してください。

本体に水が入った場合。

下図の位置に水抜き用の穴がありますので本体を傾け軽く揺らして水を抜いてください。

背部の水の抜き方		<p>① 水抜き用の穴がある右に 本体を傾けます。</p>	<p>② 軽く揺らして水を抜いて ください。</p>
座部の水抜き方			

パッドは取り外して洗うことができます。

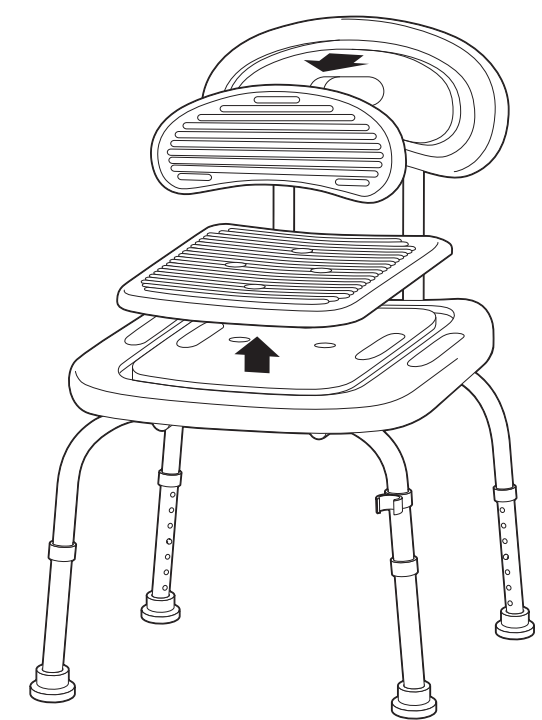

❗ 取り外す際は後ろの穴からパッドを  
押し出すように外してください。  
前から引っ張ると破損の原因になります。  
付ける際はパッドの突起をそれぞれ  
背部・座部の穴に押し込んでください。



取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (5)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (6)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (7)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございましたら  
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル  
**0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く  
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

危険



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください



回転部や可動部の指はさみ等に注意してください



お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください



床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。



定期的にボルト・ネジ類を締め直してください



お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます



廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております