


**本製品は、聴覚障害の聞き取りを補助する補聴器ではありません。**

## ● 梱包品

ご使用の前に下記の物が梱包されていることをご確認ください。万が一、不足がある場合は、お買い求めになられた販売店または当社のサポートセンターまでご連絡ください。

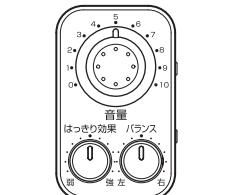


集音器 YSF-300 本体




取扱説明書(本書)



イヤホンマイク  
(イヤホンチップ中 装着済み)

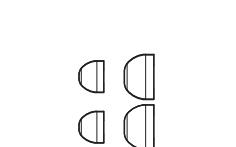

ネックストラップ

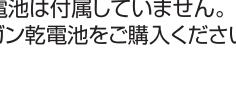

イヤホンチップ(小・大 1組)




ポーチ


\* 乾電池は付属していません。市販の単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池をご購入ください。

## ● 各部の名前

### ■ 本体

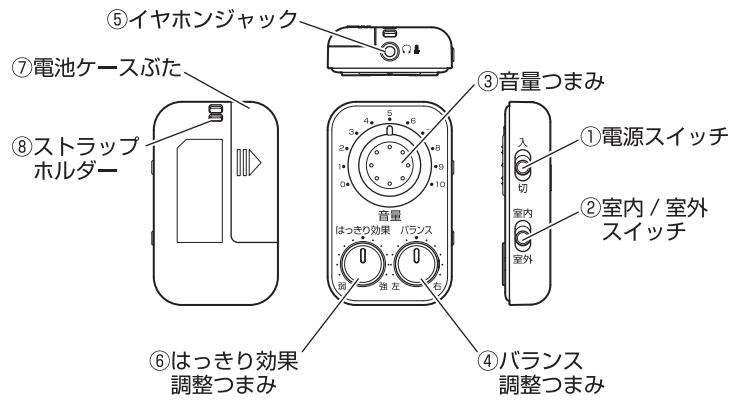

### ■ イヤホンマイク

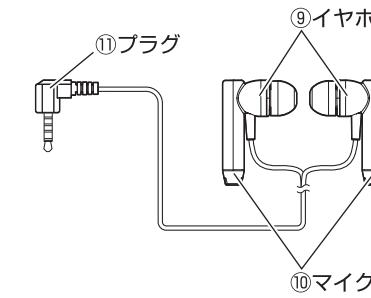

#### ① 電源スイッチ

電源の入りと切りを切り替えます。

#### ② 室内 / 室外スイッチ

音声を聞きやすくするために、高音 / 低音の特性を補正して、室内または室外のそれぞれの環境に合わせます。

#### ③ 音量つまみ

音量を調整します。時計回り(数字の大きい方)に回すと音量は大きくなります。反時計回り(数字の小さい方)に回すと音量は小さくなります。

#### ④ バランス調整つまみ

左右音量のバランスを調整します。時計回りに回すと右側の音量が大きくなります。反時計回りに回すと左側の音量が大きくなります。

#### ⑤ イヤホンジャック

付属イヤホンマイクのプラグを接続します。

#### ⑥ はっきり効果調整つまみ

時計回りに回すと音声の高域が強調され、音声がよりはっきりと聞こえます。反時計回りに回すと音声の低域が強調され、耳触りがソフトになります。

#### ⑦ 電池ケースぶた

このふたをスライドして開けて、単4形乾電池を1本入れます。

#### ⑧ ストラップホルダー

付属のネックストラップを取り付けることができます。

#### ⑨ イヤホン

ここから音声が出ます。イヤホンに取り付けられているイヤホンチップは、付属の大または小のイヤホンチップに取り替えることができます。

#### ⑩ マイク

ここから周囲の音声を入力します。

#### ⑪ プラグ

本体のイヤホンジャックに接続します。

各つまみが回しにくいときは、親指の腹を押し当てて回してください。

## ● 準備


### 乾電池を入れる

※乾電池は付属されていません。単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池を1本お買い求めください。単4形アルカリ乾電池を推奨いたします。


⚠️※充電式の電池は、使用しないでください。感電や故障の原因となることがあります。

※本機を長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り外してください。

#### 1. 本体裏面の電池ケースぶたをスライドして開きます。

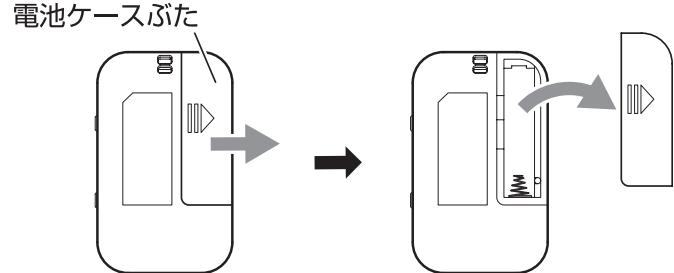

#### 2. 単4形乾電池の極性(+)、(-)を確かめながら、乾電池を1本電池ケースに入れます。

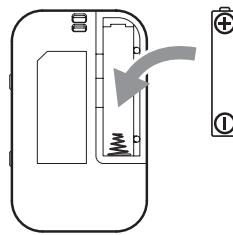


#### 3. 電池ケースぶたを閉めます。

### ● 乾電池の交換時期

乾電池の残量が少なくなると警告音が鳴ります。早めに新しい乾電池と交換してください。

### イヤホンマイクを接続する


#### 1. 本体上面のイヤホンジャックに付属のイヤホンマイクを接続します。

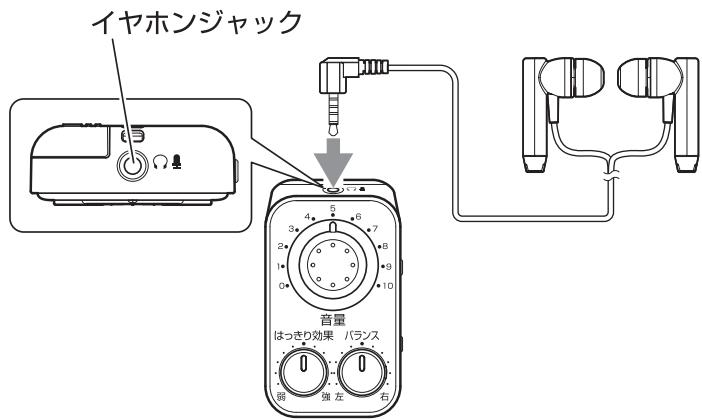


## ● 使い方

### 基本的な使い方

#### 1. 音量つまみを反時計回りに回し、「0」に合わせます。

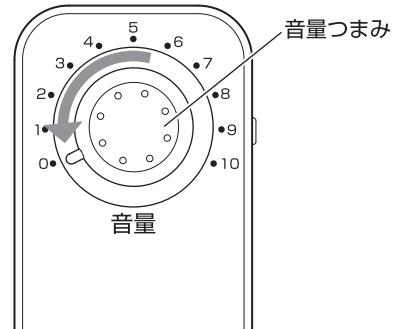

#### 2. 本体側面の電源スイッチを「入」側にスライドして電源を入れます。

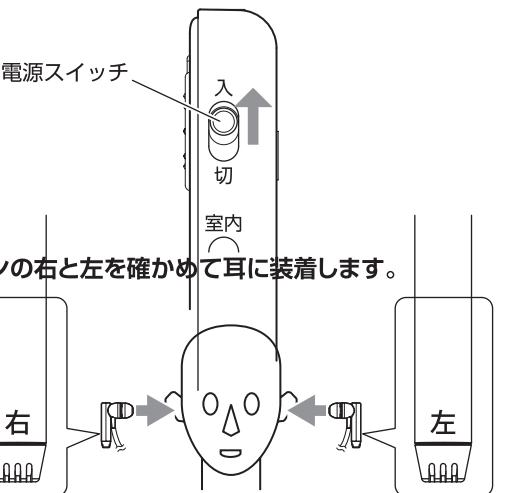

#### 3. イヤホンの右と左を確かめて耳に装着します。

#### 4. 音量つまみをゆっくりと時計回りに回し、お聞きになりやすい音量に合わせます。



#### 5. 使用を止めるときは、イヤホンを耳から外し、音量つまみを反時計回りに回し「0」に合わせ、電源スイッチを「切」側にスライドして電源を切ります。


### 便利な使い方

#### ● 音声をはっきりさせる

##### 1. 音量を聞き取りやすい音量にします。

##### 2. 音声をはっきりさせるには、はっきり効果調整つまみを時計回りにまわします。

●時計回りに回すと音声の高域が強調され、音声がよりはっきりと聞こえます。反時計回りに回すと音声の低域が強調され、耳触りがソフトになります。

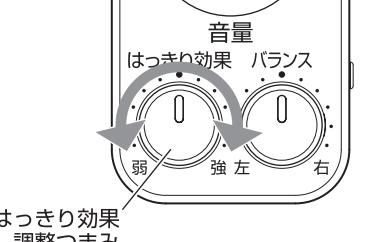


#### ● 左右音量のバランスを調整する

##### 1. 音量を聞き取りやすい音量にします。

##### 2. バランス調整つまみを時計回りまたは反時計回りに回し、左右の音量のバランスを調整します。

●時計回りに回すと右側の音量が大きくなります。反時計回りに回すと左側の音量が大きくなります。

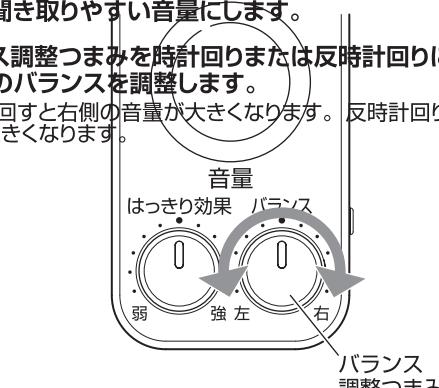


各つまみが回しにくいときは、親指の腹を押し当てて回してください。

### ● 音声を室内/室外の環境に合わせる

#### 1. 音量を聞き取りやすい音量にします。

#### 2. 本体側面の室内/室外スイッチを「室内」側または「室外」側にスライドします。

●音声を聞きやすくするために、高音/低音の特性を補正して、室内または室外のそれぞれの環境に合わせます。

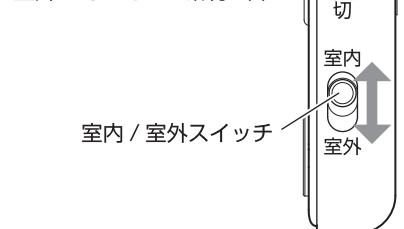


### イヤホンチップを変更


ご購入時、マイクイヤホンのイヤホン部分にはイヤホンチップの中が取り付けられています。お使いになる方の耳のサイズに合わせて、イヤホンチップを大または小に変更することができます。

#### 1. イヤホンマイクを本体から取り外します。

#### 2. イヤホンマイクのイヤホン部からイヤホンチップを取り外します。

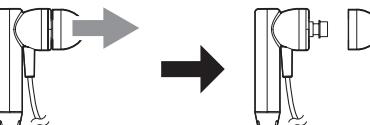

#### 3. イヤホンにお好みの大きさのイヤホンチップを取り付けます。

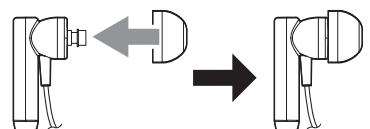

## ● お手入れ

⚠️※お手入れの前には、必ず電源を切って、イヤホンマイクを抜いてください。

### 本体のお手入れ

■本体表面は乾いた柔らかい布で、から拭きします。

■本体表面の汚れがひどい場合のみ、水で濡らした柔らかい布をよく絞ってから丁寧に拭いてください。

※メラミンスポンジなど固いスポンジやたわしは使わないでください。傷の原因になります。

※みがき粉やたわし、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使わないでください。

## ● 仕様

品名	集音器
型名	YSF-300
最大出力	115 dB SPL
音圧レベル	42 dB
最大出力電力	30 mW × 2 (左右チャンネル(f=1kHz, 8Ω))
電源	単4形乾電池×1個 DC 1.5V ※乾電池は別売り
音声出力端子	Φ3.5mm 5極ミニプラグ
マイク	エレクトレットコンデンサ
イヤホン	16Ω Φ10mm ステレオカナル式
外形寸法	約44(幅)×16(奥行)×72(高さ) mm
本体重量	約45g (イヤホン含む、電池含まず)
付属品	イヤホンマイク、イヤホンチップ(大・小各1組) ネックストラップ、ポーチ 取扱説明書(保証書付き:本書)

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。この商品は、日本国内用に設計、販売しております。海外での修理や部品販売などのアフターサービスは行っておりません。

## ● 保証とアフターサービス

### 保証について

●この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

●保証期間はお買い上げ日から1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

### ■補修用性能部品の保有期間

●本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。

●補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。

●消耗部品のご注文などについては販売店へご依頼ください。

●ご不明な点がありましたらキュリオムサポートセンターへご相談ください。

### ■保証期間中は

●お買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理致します。保証期間中であっても有料となる場合がございます。

### ■保証期間が過ぎているときは

●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店へご相談ください。

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

※ナビダイヤル是一部の電話ご利用になれない場合がございます。

#### ●キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間  
月~金 午前10時~午後5時30分  
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

メールでのお問い合わせ  
E-mail: support@qriom.com  
ホームページ: http://www.qriom.com

### ■個人情報の取扱いについて

●株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

### 長年ご使用の機器の点検!

愛情点検	このような症状はありませんか?
	●焦げくさい臭いがする。 ●本体がいつもより異常に熱い。 ●その他異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則に従ってください。