

必ずお守りください。(安全にお使いいただくために)

- 警告** ... 本体の上に乗ったり腰掛けたりしないでください。また、踏み台としての使用は避けてください。(人、物の)転倒、落下の恐れがあります。
- 警告** ... 分解・改造はしないでください。
- 警告** ... ご使用前にかたつき等がないか確認ください。異常がある場合は直ちにご使用を中止してください。
- 警告** ... 本商品は一般家庭用です。業務用での使用はお止めください。

型番 折りたたみ歩行器 KFW-16

品質表示

外形寸法：幅560(最小560/最大575)×奥行455(最小455/最大490)
×高さ715(最小715/最大890)(mm)

構造部材：本体：金属(アルミニウム)、取っ手：塩化ビニル樹脂

表面加工：アルマイト

取り扱い上の注意：イ.直射日光又は熱を避けてください。
ロ.著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
ハ.アルコール、ベンジン、磨き粉等は使用しないでください。
ニ.湿気の多い場所は避け、商品が水平になるよう設置してください。

表示者：株式会社 山善

当製品につきまして不明な点がございましたら、右記までご連絡ください。


消費者窓口 フリーダイヤル **0120-069-060**

■AM9:00~PM5:30 土日祝除く
販売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。 ① MADE IN CHINA
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

使用方法 ●下記、①~④を繰り返して前に進んでください。

- ① **両手** で歩行器を前に出します。 ② **左足** を前に進めます。 ③ **右足** を前に進めます。 ④ **両足** を揃えます。

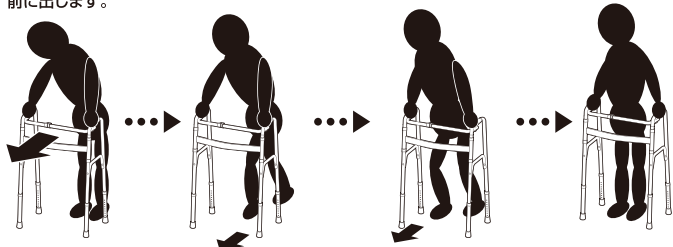

! 歩行する時は必ずグリップ部を握ってください。グリップ部以外の部分を持って歩行しないでください。

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
- ご使用されていて、健康を損なうような場合は、病院等で医師・理学療法士等、専門家のアドバイスを受けてください。交互歩行器/固定歩行器が、身体に合わない状態でご使用にならないでください。健康を損なう恐れがあります。そのような場合は、購入されたお店にご相談ください。
- 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - 取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - 保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - 一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
 - ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - 火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

ご使用上の注意

- ・お子様に乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
- ・用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
- ・隙間で体を挟み込まないように十分注意してください。事故や破損につながる恐れがあります。
- ・安全の為、商品に不具合や異常、破損が見られる場合は直ちにご使用を中止してください。
- ・本商品は屋内用です。屋外でのご使用は避けてください。
- ・本商品はご家庭での使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件での使用は避けてください。
- ・水平を保てる場所で使用してください。
- ・直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。
- ・屋外、高温多湿の場所での使用はさびが発生する恐れがあります。
- ・製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。
- ・製品のお手入れは固く絞ったタオルでふき取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。
- ・最大使用者体重：90kg

開閉方法

1 開き方 左右のフレームをしっかり握りカチッと音がするまで開きます。

! カチッと音がするまで開いてください。

2 脚部の高さを調節します

プッシュピン

使用者が、フレームの間に自然な姿勢で立ち、腕の力を抜いて手を下ろした時の手首の位置に、グリップがくる高さにします。プッシュピンが固定穴から飛び出して、しっかりと固定されているか確認してからご使用ください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

グリップ **グリップ**

両手でグリップをしっかりとつかんでご使用ください。

! 4本の脚の高さが揃うようにご注意ください。

3 閉じ方 中央付近のロックを解除し左右のフレームをしっかり握り閉じます。

! 親指で押してロックを解除してください。