


Circulate

取り扱い・組み立て説明書 YS-1060

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

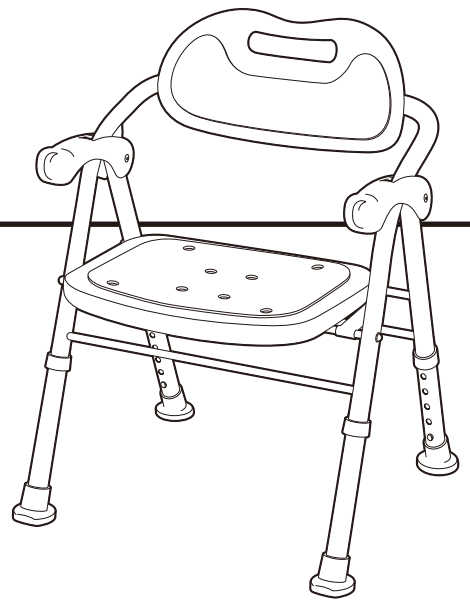


警告

- 本製品は必ず介助者が付き添った上で、使用してください。
- 使用時は、バランスに十分ご注意ください。
- 本製品に荷物を乗せたり、吊したりしないでください。
- 本製品に乗り降りの際など、急激な衝撃、または圧力をかけないでください。
- 小さなお子様が近づかないよう十分にご確認ください。
- その他、危険と思われる使い方はお止めください。
- 滑りにくく、段差のない水平な場所に置いてご使用ください。

危険

- 本体の上で飛び跳ねる等、激しい動きや立ったりしないでください。
- 踏み台や、脚立がわりのご使用はお止めください。
- 座面以外の所は、座ったり、乗ったりしないでください。
- 使用中、破損等が生じた際は、直ちにご使用を中止してください。
- 本製品は2人以上でご使用にならないでください。
- 本体に体重をかけたまま、前後左右に揺さぶらないでください。特に、後に大きく体重をかけないでください。転倒する恐れがあり大変危険です。

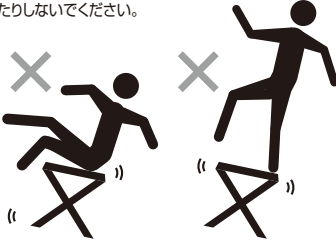

品質表示	
寸法	幅505×奥行480~560×高さ675~770(mm) 折りたたみ時:幅505×奥行165×高さ770(mm)
構造部材	フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン
表面加工	フレーム:エポキシ樹脂塗装 クッション/ポリエチレン

注意

- 組立調節は確実にを行い、ご使用前に必ず各ボルト・キャップ等、各部品が確実に固定できているかをご確認ください。また、水気がないことを確認してからご使用ください。
- 体重が100kg以上の方はご使用にならないでください。
(本製品の使用体重制限は最大100kgです)
- 不当な修理・分解・改造をしないでください。
- 座部の上に熱いものを置かないでください。
- 本製品は一般家庭用です。
- ネジの緩みがないか定期的にご確認ください。
- ネジに緩みがある場合はしっかりと締め直してください。

- 浴槽外でご使用になる際は、お子様が椅子の上で立ったり横にならないようご注意ください。
- お子様が椅子から落ちないようにご注意ください。

- 小さなお子様がご使用される際の注意事項**
- 浴槽外でご使用になる際は、お子様が椅子の上で立ったり横にならないようご注意ください。
 - お子様が椅子から落ちないようにご注意ください。

- 次のような場所には設置・保管をしないでください。**
- 極端に高温になる場所や低温になる場所
 - 屋内以外での使用
 - ホコリが多い場所
 - 直射日光の当たる場所や熱器具の近く

- 油煙が当たる場所
- 傾いたり、滑りやすい不安定な場所
- 風通しの悪い場所
- 振動の多い場所

- 本製品のお手入れ・保管について**
- 汚れはできるだけ早く落とし、十分に水気を取り乾いた布で拭き乾燥させてください。
 - ご使用後は軽く水気を拭き取ってから保管してください。
 - シンナー・ベンジン等の揮発性の溶剤でのお手入れはお止めください。
 - 長期間保管され、再び使用される場合は必ず本書の警告・注意事項を再度ご確認の上ご使用ください。
 - 脚キャップが場所によっては化学変化する場合がありますのでご注意ください。

- 故障やその他の問題が発生した場合は、お手数ですがご購入された販売店、または弊社までご相談ください。

- 廃棄について**
- 環境保護の為、放置したままにしないでください。
 - 各自治体の指示に従って処分、廃棄を行ってください。
 - ※本製品は改良のため、仕様・外観などが予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
 - ※使用目的以外のご使用は決してしないでください。
 - ※製造者は、この取扱説明書の説明や注意に従わず起きた事故等に対しては、どんな責任も負いかねます。
 - ※この説明書を紛失されましたも再発行はお受けいたしかねます。

- 本商品を浴槽に入れて使用する際の注意事項**
- 浴槽にお湯(水)を入れて本商品を使用する際は、必ず手で固定して安定した状態で座ってください。

ご使用前に

本商品を一番最初にご使用になる時は、まず付属のマットを本体座部に貼り付けてください。マット裏に貼ってある両面テープの剥離紙を剥がし、しっかりと押さえて本体に貼り付けてください。

開き方

折りたたんだ状態で座面をもち、前に引き出してイスを開脚させてください。この時、手などを挟まないようにご注意ください。

収納方法

収納時は折り畳んでください。座面の前側を持ち上げてください。この時、手などを挟まないようご注意ください。

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060
 AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
 ※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。