


使用方法

EGP-17555

1

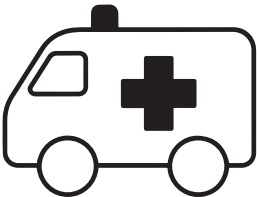

救急車を呼ぶ

2




プールを袋から出す

3



プールを広げる

4

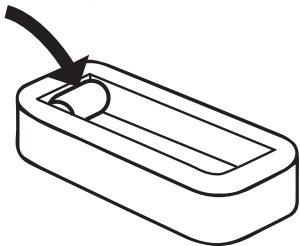


付属の枕を膨らませて
頭部ネットの下に置く

5



付属のタンクで
水を注ぐ 7~8cm

6

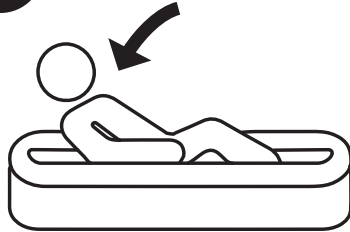

患者をプールに寝かせる

使用目的	本製品は、熱中症が疑われる際に、体表面を冷却するための緊急用簡易プールです。医療機器ではありません。	
使用上の注意	●患者の顔や頭部を水に浸けないでください。 ●使用中は患者から目を離さないでください。 ●給水してからの移動はしないでください。	●応急処置後は必ず医療機関へ引き継いでください。 ●使用後は、十分に乾燥させてから収納し、直射日光のあたらない場所で保管してください。
 使用前に確認してください	●平坦で水平な場所を選んで設置してください。直射日光や高温な場所(アスファルト等)は避けてください。 ●設置する際は、砂利などの鋭利なものがないか確認してください。	●水濡れによる感電のおそれがあるものの近くには設置しないでください。 ●製品に破れ、傷がないことを確認してから使用してください。

付属品	●本体 1 ●エアークッション 1 ●水タンク10L用 7 ●温度計 1 ●キャリーバッグ 1	
	品質表示	サイズ: 幅450×奥行1400/1750×高さ220mm 材質: 本体/エアークッション: 塩化ビニル樹脂 中板: ポリプロピレン バルブ: 塩化ビニル樹脂 キャリーバッグ: ポリエステル 水タンク: ポリエチレン 温度計: ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂

当製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なく下記までご連絡ください。



発売元／株式会社 **山善**

お客様相談窓口フリーダイヤル
[AM9:00~PM5:00 土・日・祝を除く]

0120-069-060